

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO

NOME DA UNIDADE:

DATA:

HORÁRIO:

DADOS DO EQUIPAMENTO

MODELO:

FABRICANTE:

IDENTIFICADOR:

Nº DE SÉRIE:

SETOR/LOCALIZAÇÃO

LEGENDA: “C” – Conforme | “NC” – Não conforme | “NA” – Não aplicável

DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

ITEM A SER VERIFICADO	C	NC	OBSERVAÇÕES
Disponibilidade do equipamento			

2 - VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

ITEM A SER VERIFICADO	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
Limpeza e desinfecção externa do equipamento				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel frontal				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e continuidade do cabo de força				
Bateria				
Integridade da chave liga-desliga				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)				
Calibração da tela				
Integridade e testes dos botões seletores				
Impressora				
Suporte do equipamento				

3 – VERIFICAÇÕES INTERNAS

ITEM A SER VERIFICADO	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de solda fria				
Limpeza interna				

4 – ACESSÓRIOS - ECG

ITEM A SER VERIFICADO	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/pinos				
Garras e eletrodos (tipo pera)				
Leitor de código de barras				
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Eletrodos reutilizáveis				

5 - TESTES FUNCIONAIS

ITEM A SER VERIFICADO	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
Velocidade do sinal				
Filtros				
Modo de impressão				
Qualidade de impressão				
Sensibilidade				
Botão de impressão				
Conectividade				

OBSERVAÇÕES

--

ASSINATURA DO EXECUTOR

ASSINATURA DO ENGENHEIRO